

Check-list 'fauteuil roulant sûr et prêt à l'emploi'

Utiliser la liste ci-dessous pour s'assurer que le fauteuil roulant est sûr à utiliser et que toutes les parties fonctionnent. Toujours procéder ainsi avant que l'utilisateur en fauteuil roulant n'essaye le fauteuil roulant.

Check- list: Le fauteuil roulant est-il sûr et prêt à l'emploi?

Pour l'ensemble du fauteuil roulant		Comment contrôler
Il n'y a pas de bords tranchants.	☐	Vérifiez tout le fauteuil roulant en observant (avec les yeux) et en touchant (avec les mains).
Aucune pièce n'est endommagée ou égratignée.	☐	
Le fauteuil roulant roule en ligne droite	☐	Poussez le fauteuil roulant devant vous, en vous assurant que les roues avant sont parallèles, en position 'alignée'.
Petites roues avant		
Tournent librement.	☐	Basculez le fauteuil roulant sur les roues arrière. Faites tourner les roues avant.
Tournent sans toucher la fourche.	☐	
Les boulons sont bien serrés.	☐	Vérifiez. Vous devez sentir qu'elles sont stables. Ne serrez pas trop.
Système de fixation des petites roues avant		
La fourche de la roue avant tourne librement.	☐	Basculez le fauteuil roulant sur les roues arrière. Faites tourner la fourche de la roue avant (lui faire faire un tour complet)
Roues arrière		
Tournent librement.	☐	Basculer le fauteuil roulant latéralement sur l'une des roues arrière. Faites tourner l'autre roue. Contrôlez l'autre côté.
Les boulons d'essieu sont bien serrés.	☐	Testez. Ils devraient être fixes. Ne serrez pas trop.
Pneus (si ce sont des chambres à air) sont gonflés correctement.	☐	Appuyez sur les pneus avec votre pouce. Le pneu doit s'enfoncer légèrement, mais pas plus de 5 mm.
Les mains courantes sont bien fixées.	☐	Testez.
Freins		
Fonctionnent correctement.	☐	Mettre les freins. Vérifier que le fauteuil roulant ne puisse pas bouger.
Repose-pieds		
Les repose-pieds sont solidement fixés.	☐	Testez.